

ブルークロス ハンドバルブアスピレーター 手動式吸引器 HA-210 をご利用のみなさまへ

本器は医療機器に該当します。使用前及び定期的な点検をお願いいたします。

万が一、製品が正常に動作しない場合は本紙と同梱の取扱説明書及び、添付文書をあわせてご覧ください。

【製品特徴】

本器は電気を必要とせず、気道内の異物等の吸引に使用でき、小型・軽量で携帯に便利です。
ゴム製の吸引ポンプは女性の手の大きさにも収まりやすく、軽い力で吸引ができます。

【作動原理】

吸引ポンプの上下にある金属製の排気バルブ（上部）と吸気バルブ（下部）の中には、アンブレラ（傘）型の一方弁が入っています。

吸引ポンプを圧縮または開放をするときに、この一方弁が空気の流れを排気側または吸気側にそれぞれ制御することで吸引が行えます。

吸引ができない場合の確認方法


手動式吸引器は、未使用状態での長期保管や吸引ポンプの洗浄等で残った水分によって、一方弁が吸着状態になり正常に動かない場合がございます。

その際は、下記①から③の点検項目に従って確認を行ってください。

【点検項目】

- ① 吸引ポンプに亀裂がはいっていないか、ご確認ください。
- ↩
- ② キャップ、吸引瓶など各パーツがしっかりと接続されているか、ご確認ください。
- ↩
- ③ 吸引ポンプの排気バルブ（上部）と吸気バルブ（下部）の中心穴に細い軸状の棒（ゼムクリップ等）を挿し込み、各バルブ内部の一方弁を軽く押してください。※下図参照

※ゼムクリップなどの細い軸状の棒をご用意ください。

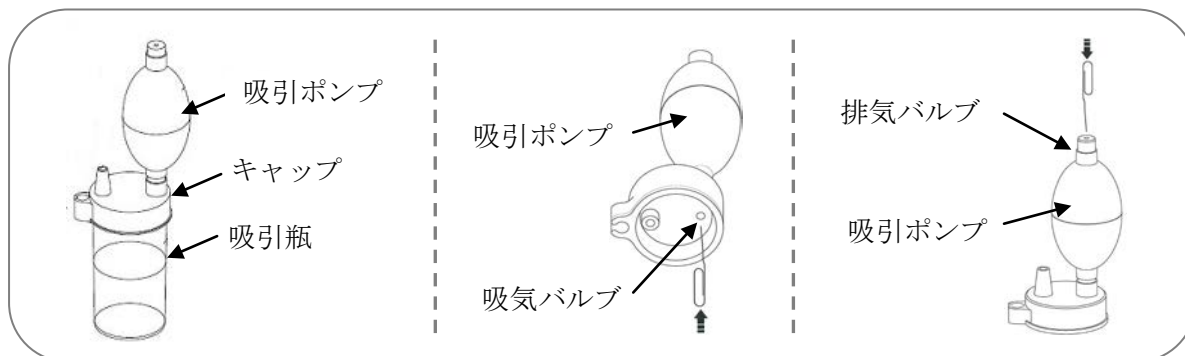

上記の確認方法でも動作不良が改善されない場合は、弊社または販売店にご連絡ください。

弊社連絡先：TEL 03-3815-2220（月曜～金曜 AM9:00～PM5:30 ※土日、祭日を除く）

(株)ブルークロス・エマージェンシー