


エマジン小型吸引器をご使用のお客様へ


吸引物による故障防止について

■吸引物による故障防止のため下記の事項をお守りください。

- ・吸引物を溜めたまま急激に吸引すると、本体への流入の原因になるため、吸引物はフロートに達する前に捨ててください。

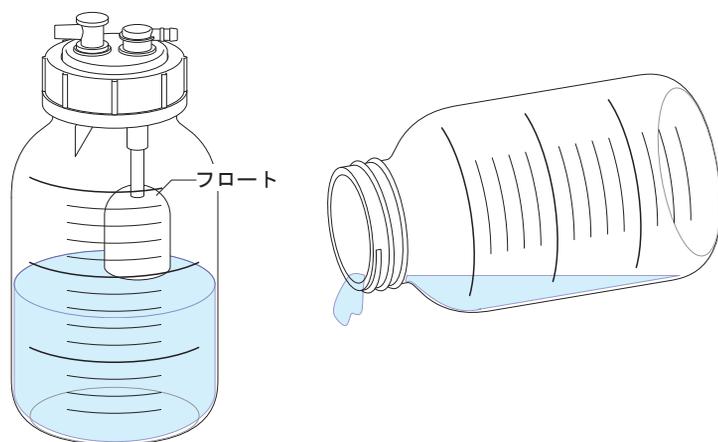

- ・吸引物がフロートの位置まで達し、フロートストップパッキンがボトルキャップをふさいだ場合は、運転スイッチをOFFにして、吸引物を捨て、フロートを下げてください。

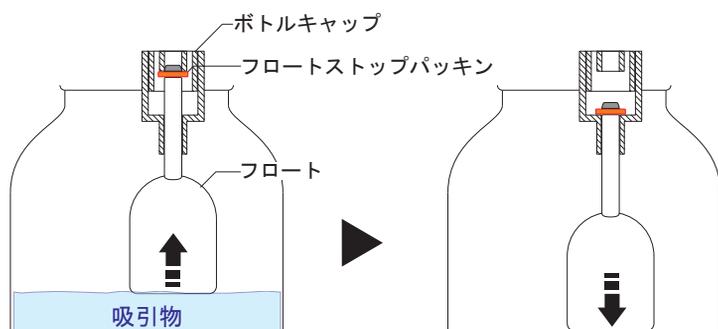

フロートストップパッキンがボトルキャップをふさいでいる状態

フロートが下がっていることを確認してください。