

## パイピング式酸素吸入器（シュレダ方式）を ご使用のお客様へ補足説明のお知らせ

製品名：パイピング式酸素吸入器（シュレダ方式）

品 番：P-F／P-FH-S／P-FH-L

写 真：



品 番：P-F




P-FH-S



P-FH-L

識別写真：

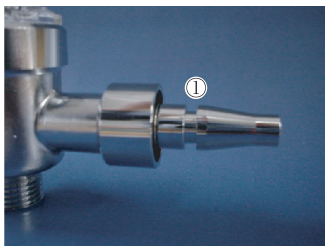

当社（ブルークロス社製）の製品は  
「流量計つまみ」の色が白です。

注意事項：アダプターの形状が円形（写真①）のため、アウトレットチャックへ接続後、外部からの接触等の影響を受けた場合、本器が垂直位置を外れてしまう可能性があるため、下記の点にご注意下さい。

- ・設置時並びに使用時は本器を垂直（加湿瓶を下）に設置してご使用下さい。
- ・流量調節時は本器が回転することがないように、本器に手を添えて、流量調節を行って下さい。

設置図： 正しい設置（垂直）

誤った設置（斜め）

